

Thermosept[®] RKF

**Alkalisch reinigingsmiddel voor de
bereiding van medische instrumenten**



- fosfaatvrij
- krachtige reiniging
- schuimvrij
- vrijgegeven door Miele

SOORT PREPARAAT

Thermosept[®] RKF is een vloeibaar, alkalisch reinigingsmiddel (concentraat) voor de thermische en chemothermische bereiding van chirurgisch instrumentarium.

Thermosept[®] RKF is vrij van fosfaten en tensio-actieve stoffen.

Thermosept® RKF

TOEPASSINGSGBIEDEN

Thermosept® RKF is geschikt voor de bereiding van chirurgische en microchirurgische instrumenten, MIC-instrumenten, starre endoscopen, anesthesietoebereiden, OK-schoenen, babyflessen, ondersteken en recipiënten van edelstaal.

Bij de bereiding van geëloxeerd aluminium moet het materiaal worden getest op alkalibestendigheid of moet het neutrale Thermosept® RKN-zym gebruikt worden.

Thermosept® RKF is geschikt voor gebruik in afzonderlijke machines en lopende bandsystemen.

GEGEVENS OVER HET PRODUCT

■ Samenstelling:

Etikettering volgens verordening (EG) 648/2004: 5 – 15 % fosfonaten, Overige inhoudsstoffen: anti-corrosiemiddelen

■ Chemische en fysische gegevens:

Concentraat:

Uiterlijk: heldere, lichtgele vloeistof
pH: ca. 14
Dichtheid (20 °C): 1,14

Gebruikoplossing van 0,3 en 0,5 %:

Uiterlijk: kleurloos, helder

GEBRUIKSCONCENTRATIES

Thermosept® RKF wordt als volgt gedoseerd: 0,3 – 0,5 %, d.w.z. 3-5 g/l.

De dosering geschiedt via de doseerpompen in de machines.

GEBRUIKSMETHODE/-AANWIJZINGEN

Te lage doseringen van Thermosept® RKF dienen te worden vermeden om puntroestvorming te voorkomen.


Thermosept® RKF is zowel geschikt voor reiniging gevolgd door een desinfecteerbeurt als voor reiniging tegelijk met desinfecteren (als het waswater niet wordt weggepompt). Met Thermosept® DK kan het gebruikt worden voor de chemothermische bereiding van thermolabel instrumentarium.

Na de reiniging verdient het aanbeveling te spoelen met het zure Thermosept® NKZ, om te verhinderen dat alkalische resten worden meegevoerd.

Het gebruik van gedestilleerd water bij de laatste spoeling verbetert het wasresultaat.



EMAS
GEPRIÛFTES
UNWELTMANAGEMENT
REG.-NR. B-150-00003

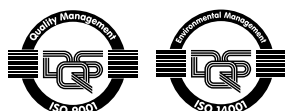

Schülke & Mayr has DIN EN ISO 9001 and DIN EN 46001 certification (Reg.-No. 4567 MP21) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-S-150 00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Telephone +49-40-521 00-0
Telefax +49-40-521 00-318
www.schuelke-mayr.com
mail@schuelke-mayr.com

LEVERINGSVORMEN / VERPAKKINGEN

Afleveringsvormen	Verpakkingseenheden	Art.-Nr.
Bus van 5 kg (215 x 245 x 140) *	1 x 5 kg	
Bus van 5 kg (249,5 x 191 x 152) *	1 x 5 kg	
Bus van 10 kg	1 x 10 kg	
Bus van 30 kg	1 x 30 kg	
Vat van 200 kg	1 x 200 kg	

* Afmetingen in mm - l x b x h

TOEBEHOREN EN DOSEERHULPMIDDELEN

	Art.-Nr.
Sleutel voor bus van 5 + 10 kg	
Sleutel voor bus van 30 kg	

ETIKETTERING VOLGENS VERORDENING VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN

(geldt voor het concentraat)

C: Bijtend. Bevat < 5 % kaliumhydroxide.

R34: Corrosief.

S26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water grondig afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S36/37/39: Tijdens het werk de gepaste beschermende kleding, handschoenen en bril / gezichtsbescherming dragen.

S45: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen.

INFORMATIE VOOR HET MILIEU



Schülke & Mayr beschikt over een gevalideerd milieumanagementsysteem volgens de ecologische auditverordening (Reg.-nr. DE-S-150 00003).

Informatie over het verpakkingsmateriaal

Thermosept® RKF wordt geleverd in bussen van 5, 10 en 30 kg en vaten van 200 kg.

De recipiënten en sluitingen bestaan uit polyethyleen (HDPE) en als dusdanig kenbaar gemaakt. Dit maakt hergebruik mogelijk. Het etiket bestaat uit PE.

De verpakkingsmaterialen van S&M zijn PVC-vrij. De verpakkingen van 5, 10 en 30 kg dragen het groene punt en kunnen verwerkt worden in het duale systeem.

Schülke & Mayr AG
Obere Zäune 12
8001 Zürich, Switzerland
Telephone +41-1-252 98 02
Telefax +41-1-252 98 27
mail.ch@schuelke-mayr.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Zieglergasse 8
1070 Wien, Austria
Telephone +43-1-523 25 01
Telefax +43-1-523 90 35 79
office@schuelke-mayr.at