


Thermosept[®] ED

**Desinfecteermiddel voor endoscopen
op basis van aldehyden**

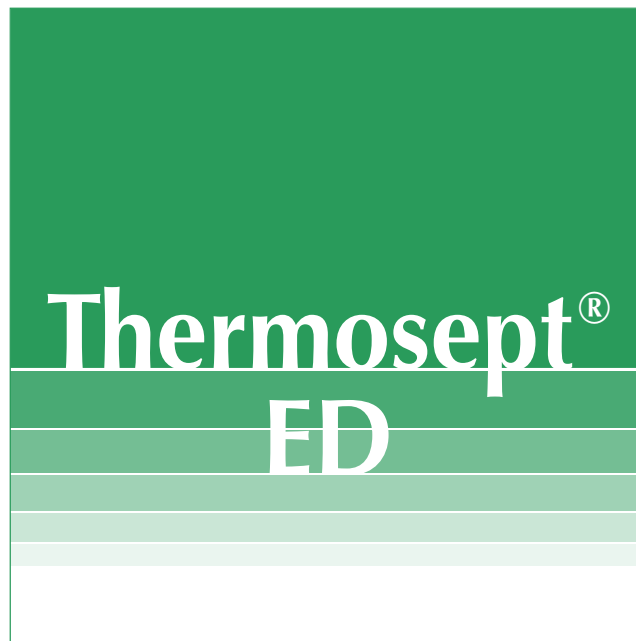

- Uitgebreide werkzaamheid
- Tast het materiaal niet aan

SOORT PREPARAAT

Thermosept[®] ED is een desinfecteermiddel op basis van glutaraaldehyde, dat gebruikt kan worden bij een werkingstemperatuur van 50 °C. In combinatie met Thermosept[®] ER is het een perfect reinigings- en desinfecteermiddel voor de geothermische reiniging van flexibele endoscopen zonder ze aan te tasten.

Thermosept® ED

TOEPASSINGSGBIEDEN

Thermosept® ER reinigt alle soorten flexibele endoscopen grondig en zonder ze aan te tasten. In combinatie met Thermosept® ED worden alle materialen gegarandeerd betrouwbaar gedesinfecteerd. Het product wordt uitstekend verdragen door diverse materialen. Desinfecteren met aldehyden wordt al jarenlang alom beschouwd als de meest optimale bereidingsmethode voor flexibele endoscopen. De uitgebreide werkzaamheid garandeert een optimale bescherming van patiënten en personeel.

GEGEVENS OVER HET PRODUCT

■ Samenstelling:

100 g Thermosept® ED bevat: 20 g glutaraldehyde, anti-corrosiemiddelen, alcohol, complexvormende stoffen

■ Chemische en fysische gegevens:

Concentraat:

Uiterlijk: kleurloze vloeistof; Dichtheid bij 20 °C: 1,04 g/cm³
pH: 3,6; Vlampunt: 57 °C (DIN 51 755)

Gebruikoplossing van 1 %:

Uiterlijk: heldere oplossing; pH: ca. 7

CONCENTRATIE VOOR GEBRUIK / INWERKTIJD

De producten worden gedoseerd door de pompen in de machine. Thermosept ED: 1 % – 5 min. 50 °C – 60 °C

De doseringen en gebruikstemperaturen van de producten moeten worden ingesteld op de machine. Hierop moet ook worden gelet als het product wordt vervangen.

LEVERINGSVORMEN / VERPAKKINGEN

Afleveringsvormen	Verpakkingen	Art. -Nr.
bus van 5 kg	1 x 5 kg	

TOEBEHOREN / DOSEERHULPMIDDELEN

	Art. -Nr.
Sleutel voor bus van 5 / 10 kg	

METHODEN/AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

Flexibele endoscopen en het endoscopische hulpinstrumentarium worden met de beproefde aldehydeproducten optimaal bereid.



Schülke & Mayr has DIN EN ISO 9001 and DIN EN 46001 certification (Reg.-No. 4567 MP21) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-S-150 00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Telephone +49-40-521 00-0
Telefax +49-40-521 00-318
www.schuelke-mayr.com
mail@schuelke-mayr.com

De bereidingsstappen zijn optimaal op elkaar afgestemd: met Thermosept® ER (enzymatische reiniging) en Thermosept® ED (aldehydedesinfectie).

De producten Thermosept® ER en Thermosept® ED zijn zo samengesteld dat ze weinig schuimen, zodat de machines met warm en koud water kunnen werken. Bij gebruik volgens de voorschriften hoeft geen storende schuimvorming verwacht te worden.

De verdraagbaarheid van Thermosept® ER en Thermosept® ED is bewezen. (Belangrijk voor procédés waarbij het desinfecteermiddel niet wordt afgevoerd, maar verder wordt gebruikt in het desinfecteerproces.)

BIJZONDERE AANWIJZINGEN

Volgens de veiligheidsvoorschriften moeten handschoenen worden gedragen bij het hanteren van desinfecteermiddelen die niet bestemd zijn voor de huid.

Thermosept® ED mag niet meer gebruikt worden na de uiterste gebruiksdatum.

ETIKETTERING VOLGENS DE EG-RICHTLIJNEN

(geldt voor het concentraat)

C: Bijtend **R20/22:** Schadelijk bij inademing, schadelijk bij opname door de mond. **R34:** Veroorzaakt brandwonden **R42/43:** kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing, kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid **S23:** Gassen niet inademen **S26:** Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met water grondig afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. **S36/37/39:** Tijdens het werk de gepaste beschermende kleding, handschoenen en bril/gezichtsbescherming dragen **S45:** Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen) Alleen in goed geventileerde ruimten gebruiken.

INFORMATIE VOOR HET MILIEU

Informatie over de verpakking



Thermosept® ER, Thermosept® ED en Thermosept® AF worden geleverd in bussen van 5 l.

De materialen zijn polyethyleen (HDPE) en als dusdanig kenbaar gemaakt. Dit maakt recycling mogelijk. De sluiting bestaat uit HDPE. De etiketten bestaan uit PE. Verpakkingsmiddelen van S&M zijn PVC-vrij en recyclebaar.

Biologisch afbreekbaar

Thermosept® ER, Thermosept® ED en Thermosept® AF zijn "makkelijk en volledig biologisch afbreekbaar" (OESO-keuringsvoorschrift 301 D)

Thermosept® ER, Thermosept® ED en Thermosept® AF vormen dus bij de gebruikelijke verdunning van de gebruikoplossing geen gevaar voor de goede werking van biologische waterzuiveringsinstallaties.

Schülke & Mayr AG
Obere Zäune 12
8001 Zürich, Switzerland
Telephone +41-1-252 98 02
Telefax +41-1-252 98 27
mail.ch@schuelke-mayr.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Zieglergasse 8
1070 Wien, Austria
Telephone +43-1-523 25 01
Telefax +43-1-523 90 35 79
office@schuelke-mayr.at