

Thermosept[®] ER

Machinale bereiding van endoscopen



- Tast het materiaal niet aan
- Enzymatische reiniging

SOORT PREPARAAT

In combinatie met Thermosept[®] ED (aldehydedesinfectie) is Thermosept ER een perfect enzymatisch reinigings- en desinfecteermiddel voor de chemothermische reiniging van flexibele endoscopen zonder ze aan te tasten.

Thermosept® ER

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Thermosept® ER reinigt alle soorten flexibele endoscopen grondig en zonder ze aan te tasten. In combinatie met Thermosept® ED worden alle materialen gegarandeerd betrouwbaar gedesinfecteerd. Het product wordt uitstekend verdragen door diverse materialen. De combinatie met tensio-actieve stoffen die goed verdragen worden door de materialen, ondersteund door een mengsel van eiwit- en vetoplossende enzymen levert een optimaal reinigingsresultaat - de voorwaarde voor efficiënt desinfecteren.

GEGEVENS OVER HET PRODUCT

■ Samenstelling:

Etikettering volgens verordening (EG) 648/2004:
5 – 15 % niet-ionische tensio-actieve stoffen, enzymen.
Overige inhoudsstoffen: anti-corrosiemiddelen

■ Chemische en fysische gegevens:

Concentraat:
Uiterlijk: heldere, lichtgele vloeistof
Dichtheid bij 20 °C: 1,03 g/cm³
pH: ca. 6,7
Vlampunt: 45 °C (DIN 51 755)

Gebruikoplossing van 0,3 – 0,5 %:
Uiterlijk: heldere, kleurloze oplossing
pH: ca. 8

GEBRUIKSCONCENTRATIE

Thermosept® ER wordt gebruikt bij een concentratie van 0,5%. De producten worden gedoseerd door de pompen in de machine.

De doseringen en de gebruikstemperaturen van de producten moeten worden ingesteld op de machine. Hierop moet ook worden gelet als het product wordt vervangen.

LEVERINGSVORMEN / VERPAKKINGEN

Afleveringsvormen	Verpakkingen	Art.-Nr.
bus van 5 kg	1 x 5 kg	

TOEBEHOREN / DOSEERHULPMIDDELEN

	Art.-Nr.
Sleutel voor bus van 5 / 10 kg	



EMAS

GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG.-NR. DE-150-00003



Schülke & Mayr has DIN EN ISO 9001 and DIN EN 46001 certification (Reg.-No. 4567 MP21) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-S-150 00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Telephone +49-40-521 00-0
Telefax +49-40-521 00-318
www.schuelke-mayr.com
mail@schuelke-mayr.com

METHODEN/AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

Flexibele endoscopen en het endoscopische hulpinstrumentarium worden met de beproefde aldehydeproducten optimaal bereid.

De bereidingsstappen zijn optimaal op elkaar afgestemd: met Thermosept® ER (enzymatische reiniging) en Thermosept® ED (aldehydedesinfectie).

De producten Thermosept® ER en Thermosept® ED zijn zo samengesteld dat ze weinig schuimen, zodat de machines met warm en koud water kunnen werken. Bij gebruik volgens de voorschriften hoeft geen storende schuimvorming verwacht te worden.

De verdraagbaarheid van Thermosept® ER en Thermosept® ED is bewezen. (Belangrijk voor procédés waarbij het desinfectiemiddel niet wordt afgevoerd, maar verder wordt gebruikt in het desinfectieproces.)

BIJZONDERE AANWIJZINGEN

Volgens de veiligheidsvoorschriften moeten handschoenen worden gedragen bij het hanteren van desinfectiemiddelen die niet bestemd zijn voor de huid.

Thermosept® ER en Thermosept® ED mogen niet gebruikt worden na de vervaldatum.

ETIKETTERING VOLGENS DE EG-RICHTLIJNEN

(geldt voor het concentraat)

R10: Ontvlambaar.

INFORMATIE VOOR HET MILIEU

Informatie over de verpakking



Thermosept® ER, Thermosept® ED en Thermosept® AF worden geleverd in bussen van 5 l.

De materialen zijn polyethyleen (HDPE) en als dusdanig kenbaar gemaakt. Dit maakt recycling mogelijk. De sluiting bestaat uit HDPE. De etiketten bestaan uit PE. Verpakkingsmiddelen van S&M zijn PVC-vrij en recyclebaar.

Biologisch afbreekbaar

Thermosept® ER, Thermosept® ED en Thermosept® AF zijn "makkelijk en volledig biologisch afbreekbaar" (OESO-keuringsvoorschrift 301 D)

Thermosept® ER, Thermosept® ED en Thermosept® AF vormen dus bij de gebruikelijke verdunning van de oplossing geen gevaar voor de goede werking van biologische waterzuiveringsinstallaties.

Schülke & Mayr Ges.m.b.H
Zieglergasse 8
1070 Wien, Austria
Telephone +43-1-523 25 01
Telefax +43-1-523 90 35 79
office@schuelke-mayr.at

Schülke & Mayr AG
Obere Zäune 12
8001 Zürich, Switzerland
Telephone +41-1-252 98 02
Telefax +41-1-252 98 27
mail.ch@schuelke-mayr.com